


Full Arch 最终修复下单指南

1 选择订单类型

- 选择 'DIONavi 修复'

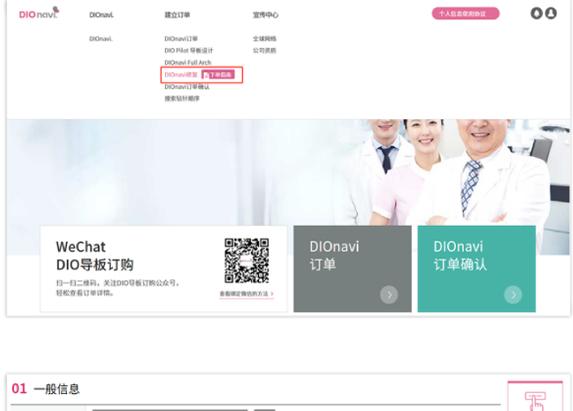


2 一般信息

- ① 选择 '合同套包'
- ② 确认 '客户信息' → 医生和收件地址不符, 请填写正确信息
- ③ 填写 '患者姓名'
- ④ '修复体' (Fullarch分为4种修复方式)
- ⑤ '选择牙位'



3 选择牙位

- 点击选择上颌/下颌 (注意: 选好牙位后不点击 '保存')

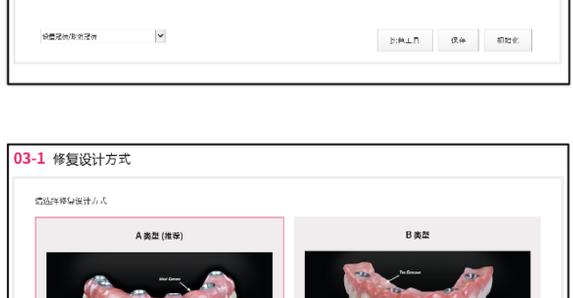

4 选择设计方式

- 选择2种设计方式



5 选择修复方式及订单保存

- 点击 '保存' 后牙位变为绿色, 鼠标移动到牙位处可显示修复设计方式, 确认是否正确




6 订单提交

- 如有其它要求请填写后 点击 '提交'




7 订单确认

- 订单生成后, 确认内容无误 点击 '文件上传'

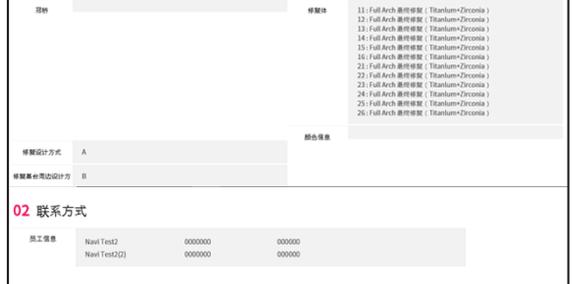

8 上传文件

- ① 上传患者口内扫描数据
- ② 上传患者照片 (露齿正面照, 侧面照, 微笑照, 大笑照, 中线照, 咬合照, 比色照)

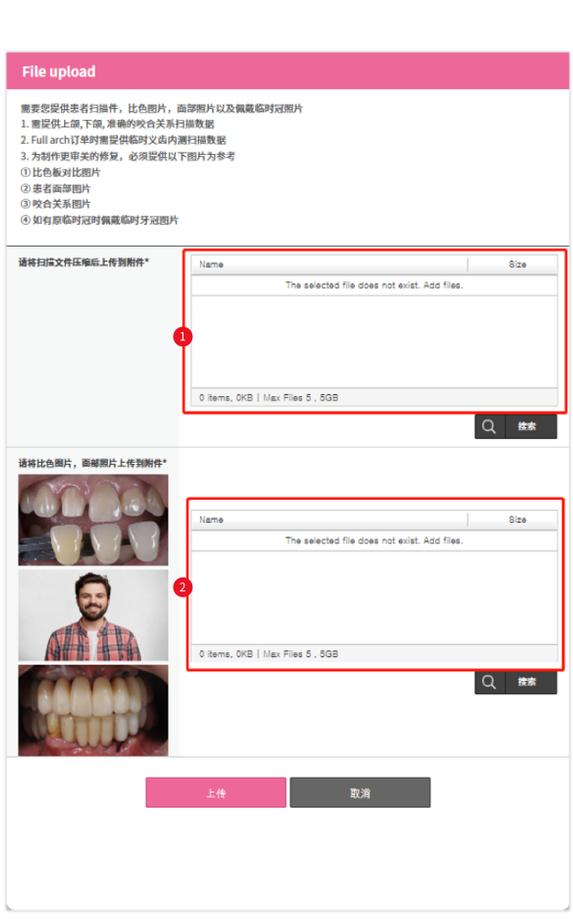

9 扫描数据

- ① 扫描咬合关系时务必让患者保持坐姿, 确定咬合关系准确后进行扫描。
- ② 大范围扫描牙龈。
- ③ 扫描临时义齿时, 需基台内侧无硅胶状态下进行扫描。
- ④ 将口内取得的扫描托盘 / 扫描夹具寄送给四川迪雅。



10 患者照片

- 露齿正面照, 侧面照, 微笑照, 大笑照, 中线照, 咬合照, 比色照等。



11 扫描托盘适用方法



- 连接修复基台时, 用探针刮修复基台周边, 防止软组织嵌入 (先手动后扳手, 加力15N)
- 连接修复基台时, 注意让患者用鼻子呼吸, 如果口内掉东西, 不要吞咽, 保持不动等待医生取出
- 请注意: 连接修复基台时, 医生应保持手部干爽, 始终固定住修复基台, 以免掉落于患者口内



- 佩戴扫描夹具, 检查夹板孔洞位置是否准确, 如有阻挡, 使用打磨机扩大孔洞



- 修复基台内塞入小棉球, 防止成型树脂进入到螺丝孔内
- 准备好成型树脂的粉和液, 放在医生方便拿取的地方
- 医生一手托住扫描夹具保持不动, 另一只手用毛笔先蘸液后蘸粉, 涂抹在修复基台和孔洞上, 先固定两个孔位, 再粘接其余部分, 使成型树脂包裹住修复基台, 形成圆弧状。注意一定要让修复基台稳定地固定在孔洞内。
- 助手在旁边使用吸唾, 减少气溶胶味道
- 待成型树脂完全凝固后, 取下修复基台及扫描夹具 (螺丝顺序 2-6-2-6-4-4)
- 成型树脂不宜涂抹过多, 否则容易变形, 可固定住即可。

