

# Full Arch 即刻修复下单指南



## 1 选择订单类型

- 选择 'DIONAVI Fullarch'

## 2 一般信息

- ① 选择 '合同套包'
- ② 确认 '客户信息' → 医生和收件地址不符, 请填写正确信息
- ③ 填写 '患者姓名'
- ④ '选择牙位'



## 3 选择牙位

- ① 选择需植入的牙弓和植入数量
- ② 选择想要植入牙位 (设计过程中根据骨条件牙位可能变动)
- ③ 选择订购类型
- ④ '保存'



## 4 订购类型

- ① 夜磨牙垫: 制作对颌牙, 防止术后患者因磨牙导致临时修复冠断裂 (上下颌同时修复病例时不提供)
- ② 模型底座: 获取复合基台位置坐标的工具  
如在我方制作 'Full Arch 临时冠' 时选择, 并一同出库  
术后即刻取得口内数据后将模型底座寄回我方, 用于制作下一修复体



## 5 订单提交

- 如有其它要求请填写后 点击 '提交'



## 6 订单确认

- 订单生成后, 确认内容无误 点击 '文件上传'




## 7 上传文件

- ① 上传患者压缩版CT数据 (文件名称为患者姓名)
- ② 上传患者压缩版口内扫描数据 (文件名称为患者姓名)
- ③ 上传患者面部照片  
咬合关系图片  
及佩戴临时牙冠图片
- ④ 石膏模型病例请包装好 寄回到四川迪耀。 点击(上传)完成订单



## 8 Full Arch 扫描数据

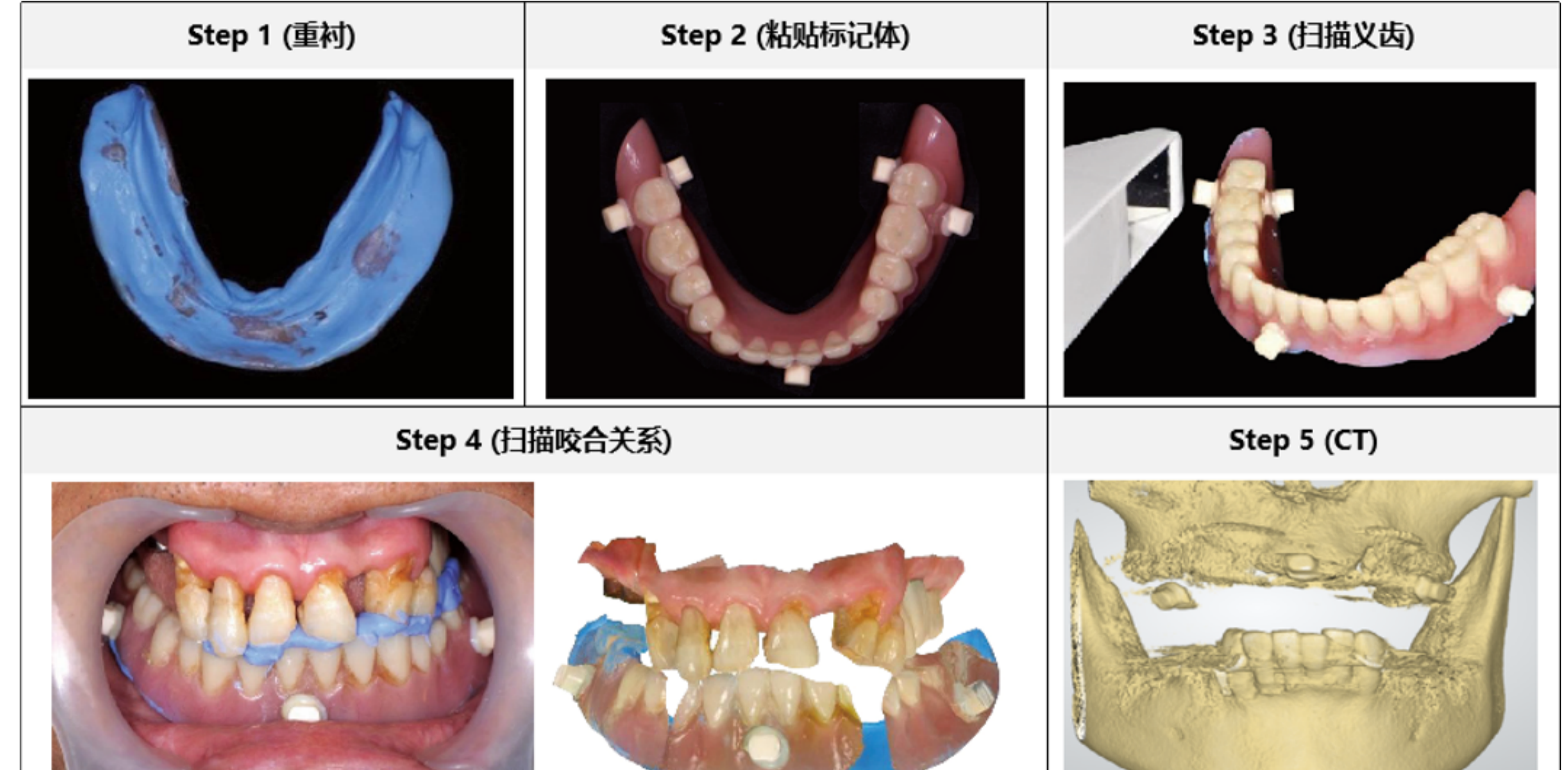

## 9 Full Arch 即刻修复出库产品

- ① 种植手术导板
- ② PB 临时义齿
- ③ Full Arch 模型
- ④ 复合基台
- ⑤ 临时基底
- ⑥ 数字化替代体
- ⑦ 基台定位器
- ⑧ 夜磨牙垫
- ⑨ 模型底座 (下单时)



## 10 Full Arch 模型底座使用方法

